



## Bandáž na zápěstí S8514

### Použití/ popis produktu:

- Zmírňuje bolest způsobenou kompresí a fixací poraněného kloubu
- Prodyšný elastický materiál zajišťuje mírnou fixaci a stabilizaci zápěstního kloubu
- Poskytuje terapeutické teplo, má nastavitelný pásek na suchý zip, který přizpůsobuje kompresi kolem zápěstí a zajišťuje pohodlné nošení a stabilizaci během aktivit.
- Vnitřní vrstva je vyrobena z měkké bavlněné tkaniny pro větší pohodlí.
- **Univerzální velikost.**
- **Hodí se pro pravou i levou ruku**

Prodyšný materiál (aeropren) udržuje teplo, aniž by narušoval funkce pokožky (ochrana termoregulace atd.), zlepšuje krevní oběh a zajišťuje maximální pohodlí.

### Indikace k použití:

Bolesti zápěstí způsobené úrazem nebo poraněním, různé poruchy zápěstního kloubu. Omezený rozsah pohybu způsobený úrazem nebo zraněním a ochabnutím vazů. Chronický zánět šlach: stav po úrazu nebo operaci. Profesionální rizikové expozice na zápěstí (vibrace, rotace, zvedání závaží). Prevence úrazů na všech úrovních sportu a pohybových aktivit.

**Doporučení pro použití:** Před použitím se poraďte se svým lékařem. Doporučuje se nosit přímo na tělo

nebo spodní prádlo. Individuální léčbu a dobu používání stanoví lékař.

**Kontraindikace:** Lokální onemocnění kůže, individuální intolerance na použitý materiál.

### Jak správně nasadit ortézu:

#### Na pravou ruku:



#### Na levou ruku:



**Údržba:** Perte s jemnými čisticími prostředky při teplotě do + 35 ° C. Neotírejte ani neždímejte při praní a oplachování. Sušte mimo zdroj tepla. Nežehlete. Nebělte. (Nepoužívejte bělicí prostředky obsahující chlor. Nepoužívejte chemické čištění.

**Upozornění:** Používejte pouze za účelem, ke kterému byla ortéza vyrobena. Doba používání může být upravena pouze na základě doporučení lékaře. Výrobek se nedoporučuje nosit do 30 minut po aplikaci lokálních hřejivých mastí.

**Složení:** 15% bavlna, 65% aeropren, 20% polyester

**Podmínky skladování:** Skladujte na suchém místě při teplotě od +5°C do +40°C. Udržujte mimo dosah přímého slunečního svitu.

**Datum výroby:** Uvedeno na obalu.

**Distributor:** medHaus s.r.o., Kačírkova 986/11, 158 00, Praha 5, Tel: 226 202 268,

e-mail: [medhaus@medhaus.cz](mailto:medhaus@medhaus.cz), [www.medhaus.cz](http://www.medhaus.cz), [www.medpack-group.cz](http://www.medpack-group.cz)

**Výrobce:** Medtex Swiss Ltd, 15 Konservna str., Gabrovo, Bulgaria 5300 tel.: +359 888 059 356, e-mail:

[info@medtex-swiss.ch](mailto:info@medtex-swiss.ch), [medpack-group.com](http://medpack-group.com), [medtex-swiss.ch](http://medtex-swiss.ch), [dr-frei.com](http://dr-frei.com) Dr. Frei is a registered Trademark of FreiCare Swiss AG, Switzerland. A Swiss Brand.