

## Pooperační ortéza kolenního kloubu

Kód # 6303




**Indikace:** Po traumatu vazů kolenního kloubu. Bolesti kolenního kloubu (syndrom patelafemorální bolesti). Zánětlivé a degenerativní onemocnění (artritida, synovitida, otoky kolenního kloubu a artróza), pokud není teplý účinek kontraindikován. Chronické, pooperační a posttraumatické záněty šlach. Traumata česky. Rehabilitace po traumatech a operacích kolenního kloubu. Prevence proti poranění kolenního kloubu a prevence proti zánětu v případě fyzické aktivity. Prevence úrazů česky při sportovních aktivitách a fyzické práci.

**Funkce:** Bandáž je vyrobena z aeroprénu, materiálu s jedinečným způsobem zadržování tepla, interferující s funkcemi pokožky (termoregulace, prokrvení, ochrana atd.) a vyztužena dvěma kovovými dlahami. Otvor nad česku omezuje ohyb a chrání ji. Upevňování pomocí suchých zipů zajišťuje nasazení ve správné pozici a dvou-kloubové výztuhy zaručují optimální ohyb. Ortéza umožňuje zkrátit dobu nošení sádry.

- možnost úplného rozepnutí umožňuje nasadit ortézu přes otok i případný obvaz
- rychlý přístup ke kolenu usnadňuje převazování a provádění dalších lékařských úkonů
- optimální při velkých rozdílech obvodu nohy nad a pod kolenem
- pohodlné nasazování u lidí s nadváhou
- vhodná pro levou i pravou nohu



Dvě kovové kloubové výztuhy

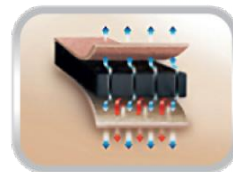

Aeroprén (zdravotně nezávadný neoprén s mikroventilací)

### Tabulka velikostí:

Rozměry	Velikosti		Max. odchylka
	S/M	L/XL	
Obvod kolena v cm	34-42	43-50	±1,0 cm

**Barva:**

černá

**Měří se přes koleno**

**Doporučení:** Vhodnost kovových výztuh v ortéze kolenního kloubu a trvání používání doporučuje lékař. Před vložením výztuh rozepněte všechny suché zipy a uvolněte popruhy. Koncová poloha ohybu kolene musí odpovídat úhlu ohybu kovových výztuh. Čěška musí být ve středu otvoru. Po upevnění všech popruhů zkontrolujte, zda je pozice ortézy na noze správná.